



Pour vous protéger dans le déconfinement, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de fournir à chacun de ses habitants un masque.

Ce sont des masques réutilisables et lavables. Leur qualité a été vérifiée par les laboratoires de contrôle. Ils viennent d'entreprises de notre région.

Restez attentifs aux autres gestes barrières. C'est ensemble qu'on arrivera à surmonter cette épreuve.

Prenez soin de vous et des vôtres.

NOTICE D'UTILISATION D'UN MASQUE GRAND PUBLIC

selon **AFNOR SPECS76-001** du 27 Mars 2020

Catégorie 1 **suivant la note d'information interministérielle** du 29 mars 2020

Masques à Usages Non Sanitaires

Domaine d'utilisation :

Ce masque est exclusivement réservé à des Usages Non Sanitaires (UNS). Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes.

L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.

Se protéger et protéger les autres



Se laver les mains très régulièrement




Tousser ou éternuer dans votre coude ou dans un mouchoir



Utiliser des mouchoirs à usage unique



Saluer sans serrer la main ni embrassade

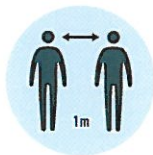

Garder une distance de un mètre avec votre interlocuteur

Performances

Protocole d'essais décrit dans le document DGA du 25 mars 2020

Masque catégorie 1 « UNS 1 » :

- masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public.
- Efficacité de filtration des particules de $3 \mu\text{m}$: > 90% Respirabilité: essai de perméabilité à l'air > $96 \text{ L.m}^2\text{.S}^{-1}$ pour une dépression de 100 Pa
- Matériau dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit (rapport RP/20-2307/DGA MNRBC/2000305/NP) et qui supporte 10 lavages (rapport RP/2609/DGA MNRBC/2000305/NP)


Utilisation

Le temps de port du masque est limité à 4 heures.
Design AFNOR, testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

Recommandations de manipulation des masques




1- avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique

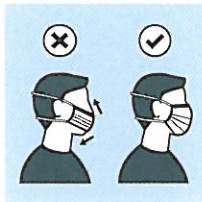

2- appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage



3- vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte

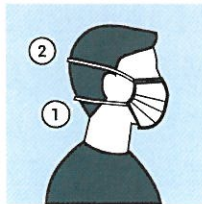

4- pour retirer le masque: l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque); le déposer immédiatement dans un sac prévu à cet usage



5- se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique

- lorsque l'on porte un masque: éviter de le toucher; ne pas déplacer le masque;
- chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique;
- si besoin de boire ou de manger, changer de masque;
- lorsqu'il s'humidifie, le remplacer par un nouveau masque;

Entretien du masque

Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac réutilisable à laver. Le masque et le sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Explication sur la méthode de lavage

Lavage ménager en machine avec un cycle complet à 60°C , d'une durée minimum de 30 minutes avec détergent classique. Séchage en tambour.



Stockage

Masques non utilisés à stocker dans un endroit propre, sec et à l'abri de la lumière.

Contexte d'utilisation

Ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au Covid-19.

Composition de la matière principale:

Polyester

« Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2). »

Pour toute information complémentaire, se référer à la norme AFNOR SPEC S76-001